


経腸栄養チューブなどの接続部分

# 新規格コネクタ 使用上のご注意

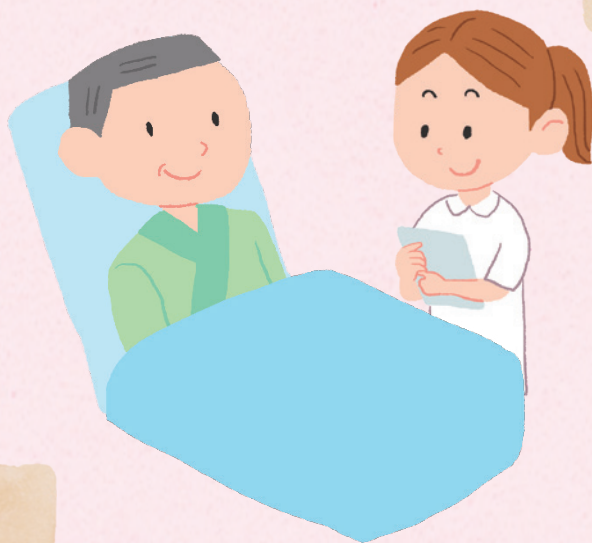


異なる治療分野での医療機器誤接続を防止するために、  
国際規格に準拠したコネクタ形状に変更されました。

# 経腸栄養関連製品の接続部分の形状が変更されました。




## コネクタの形状が変更になりました

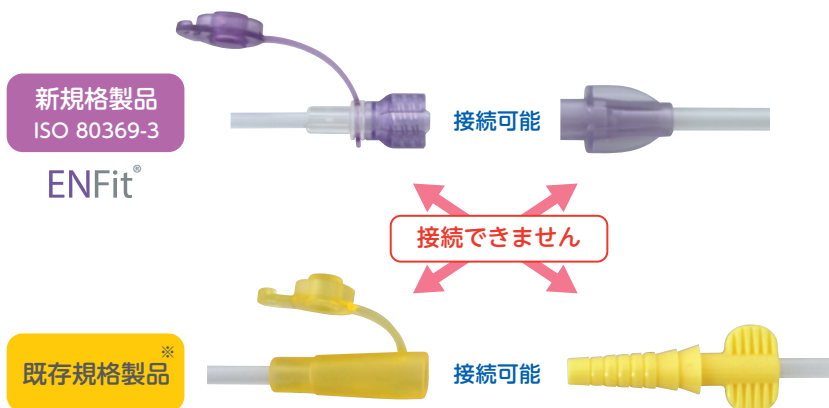

※2022年12月以降は、新規格製品のみのお荷となります。

## 経腸栄養コネクタの先端チップが短くなりました

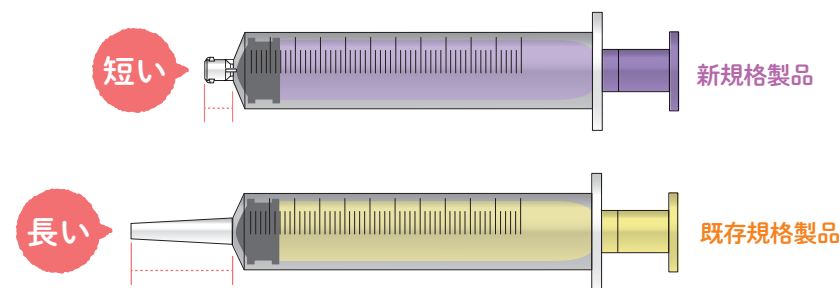


## 採液がやりにくい場合は…

採液アダプタ




「採液アダプタ」を使用することで  
採液が行いやすくなります。

## 📌 ご注意

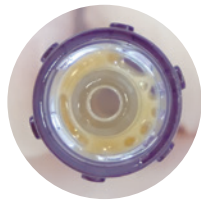


汚れている

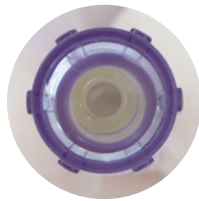

清潔

経腸栄養コネクタの先端を汚さないようにし、清潔に保つようご注意ください。


## 📌 プライミング

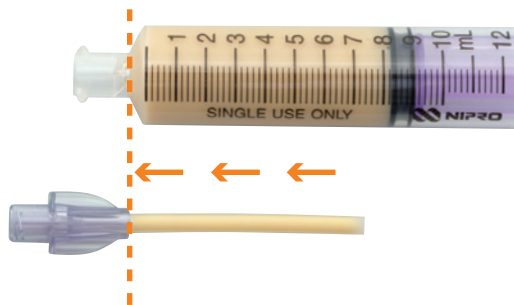


カテーテル側のコネクタが汚れるのを防止するため、先端まで栄養剤などを満たさないようにしてください。

## 📌 投与の後は

投与器具側を下側にしてコネクタを取り外します。

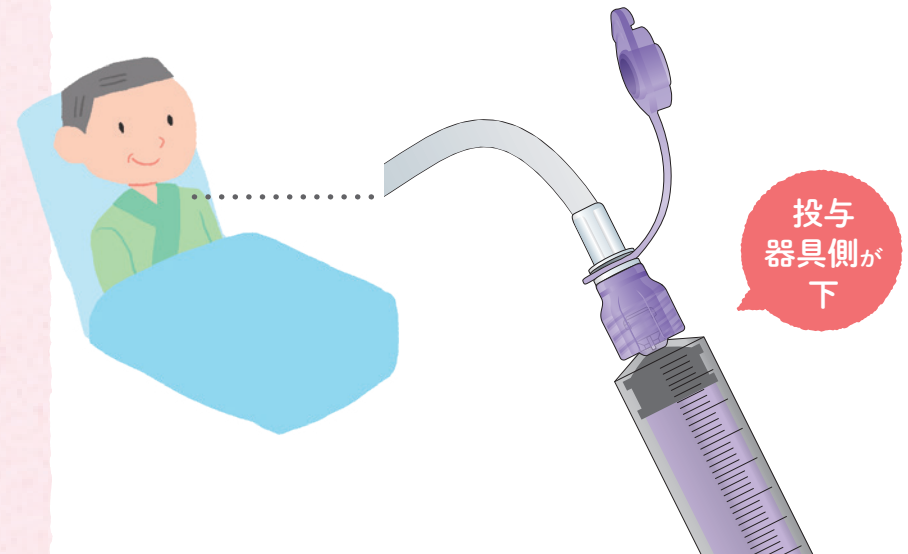

投与器具側を上側にしてコネクタを取り外すと、カテーテル側に栄養剤などが垂れ込み、汚れの原因になります。

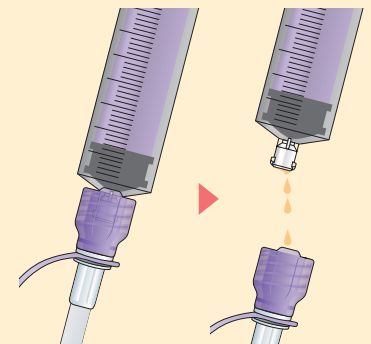

## 汚れてしまったら


カテーテル側のコネクタが汚れた場合は、  
下記の方法等で洗浄してください。

詳しくは下記URL、右記QRコードより  
ご確認ください。  
(NPO法人PDNホームページ)  
<http://www.peg.or.jp/kurukuru>



### 水を使用する方法

【用意するもの】

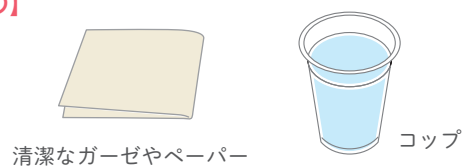


1. コップに水を入れる。



2. 汚れたコネクタを  
コップの水に入れる。





3. コネクタを優しく揺すって  
汚れを落とす。

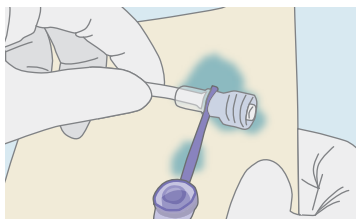


4. 清潔なガーゼやペーパーで  
拭く。

### 専用ブラシを使用する方法


【用意するもの】

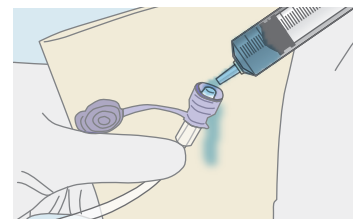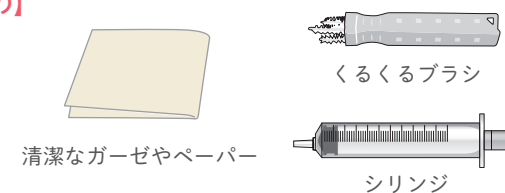

1. 汚れた部分に少量の水を  
かける。

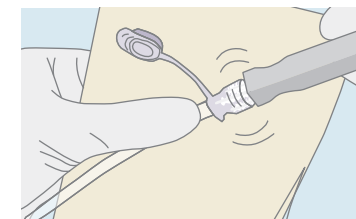

2. くるくるブラシをコネクタ  
に挿入し、優しく回転させ  
汚れを落とす。

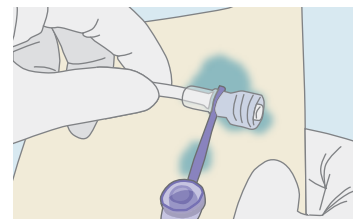


3. 清潔なガーゼやペーパーで  
拭く。



## 接続ができない場合

投与器具のコネクタ規格が異なっている可能性があります。

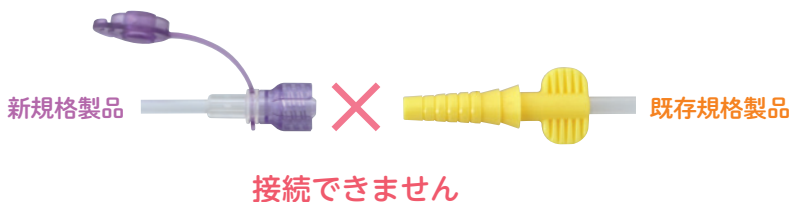

新規格製品と既存規格製品を接続するためには、別途変換コネクタが必要です。



コネクタ形状変更に関するご相談・ご質問は  
お近くの医療機関までご相談ください。

