

# Cocoron改修内容について



## 1 「心拍数：-」表示について


電極が外れたり、身体にしっかりと貼られていない場合、外れてから70秒後※に「心拍数：-」表示となります。

**速やかに**装着し直してください。

※本機仕様

## 2 電池残量表示について

### 【電池残量】

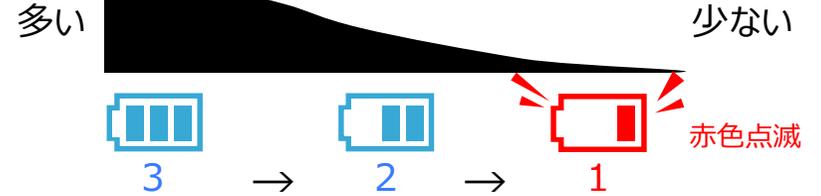

▶ 残量 2 → 1 は急激に減る可能性があります。  
残量 2 になりましたら新しい電池をご準備ください。

見守りチームの医療関係者の設定によっては、  
**残量 1**：赤色点滅表示になると次のメッセージが表示されます。

HeartLineシステムから新着メッセージが届きました。

丸ノ内 四郎さんのCocoronの電池がもうすぐ切れま  
す。交換してください。

**速やかに**交換してください。

一覧へ

閉じる


## テレビ電話の改修内容について

テレビ電話終了時に次のメッセージが表示されます。

端末のOSによって、メッセージが出ない場合があります。

『「完了」を押して画面を閉じてください』のメッセージが表示される場合は、必ず **完了** をタップしてください。

「TV電話を終了する」のメッセージが表示される場合は、必ず当該ボタンをタップしてください。

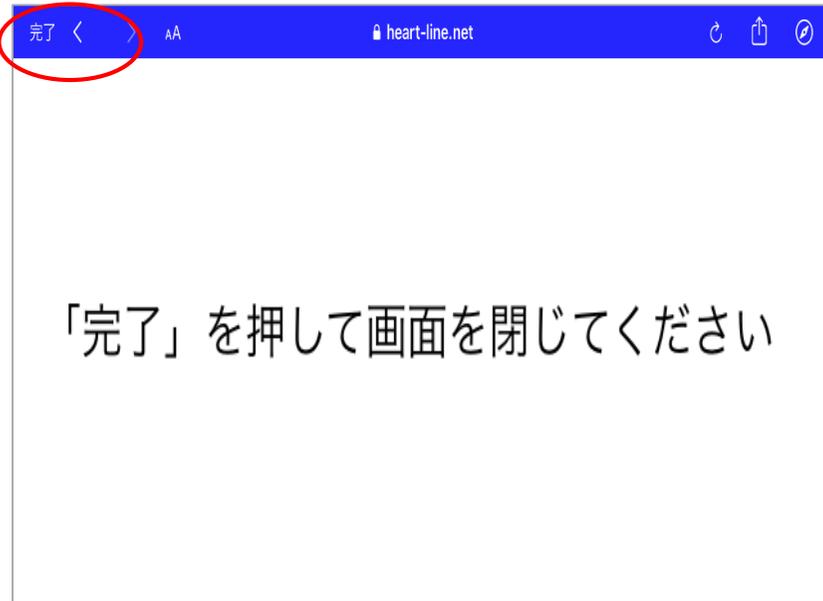

**重 要**

**必ず「完了」、「終了する」をタップしてください。**